



## Le système Champions

1. Portrait de la société 
2. Trousse de chirurgie & instruments 
3. Champions (R)Evolution Chirurgie 
4. Champions (R)Evolution Prothèse 
5. Champions Tête carrée 
6. Champions Tête boule 
7. Implant en zircone PATENT 
8. Smart Grinder 
9. PlasmaSafe 

**CHAMPIONS** 



Nous sommes  
à votre disposition

Lundi, Mardi, Jeudi:  
7h30 à 18h00  
Mercredi:  
7h30 à 16h00  
Vendredi: 7h30 à 14h00

TÉLÉPHONE:  
+49 (0) 6734 91 40 80

FAX:  
+49 (0) 6734 10 53

E-MAIL:  
[info@champions-implants.com](mailto:info@champions-implants.com)

ONLINE-SHOP:  
[champions-implants.shop](http://champions-implants.shop)

# TABLE DES MATIÈRES

Smart Grinder & accessoires | *page 4*

Instructions | *page 8*

Les produits et les désignations présentés dans cette liste des prix sont en partie protégés par des marques, des brevets, et des droits d'auteur. L'absence d'une Référence spéciale ou du symbole ® ou TM ne signifie pas qu'aucune protection légale n'existe. Vous pouvez trouver un aperçu via le code QR.



Les informations du fabricant conformément à MDD (Medical Device Directive [directive relative aux dispositifs médicaux]) / MDR (Medical Device Regulation [réglementation relative aux dispositifs médicaux]) sont indiquées sur l'étiquette du produit.






# Smart Grinder



# Smart Grinder

Le Smart Grinder est un dispositif permettant de réaliser une greffe autologue à partir des dents extraites du patient. Le protocole se décompose en plusieurs étapes (nettoyage dent, broyage, tamisage, décontamination, tampon phosphate) et dure environ 15 minutes. L'utilisation du Smart Grinder s'intègre parfaitement dans le cadre d'un traitement de préservation d'os alvéolaire ou de comblement. Le procédé est éprouvé scientifiquement. Le kit complet se compose d'une base principale et de 6 kits patients comprenant une chambre de broyage et des solutions de décontamination.

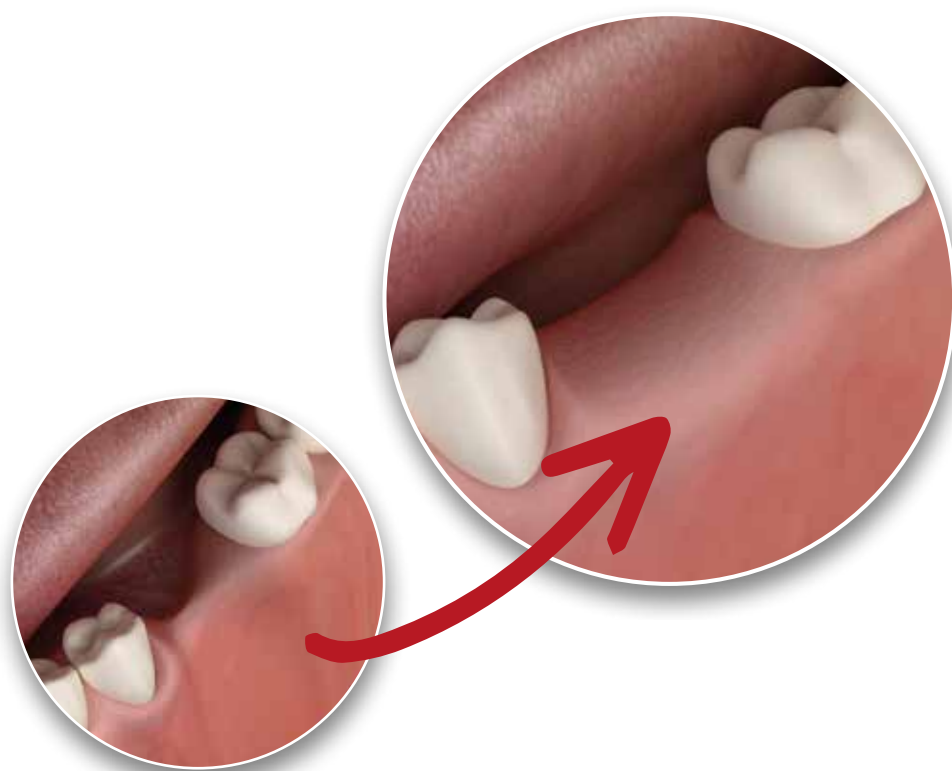

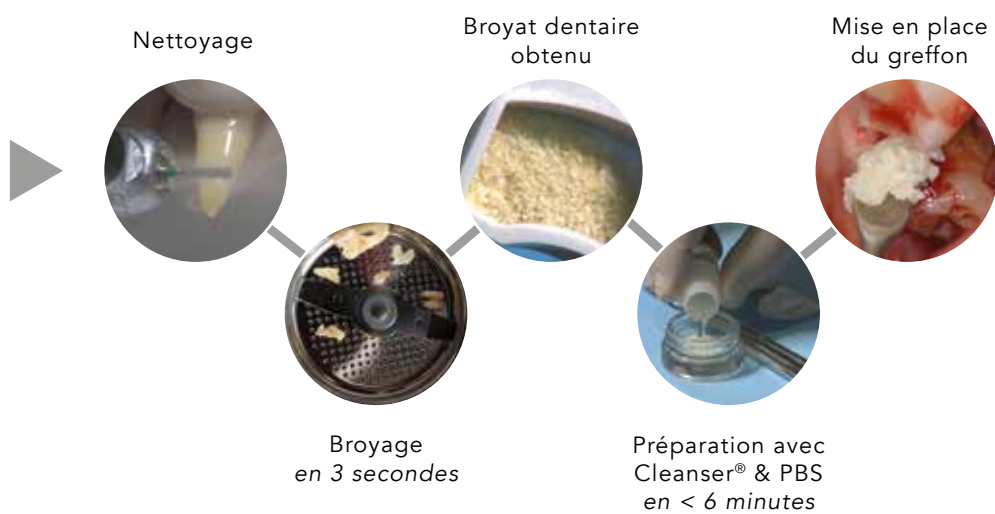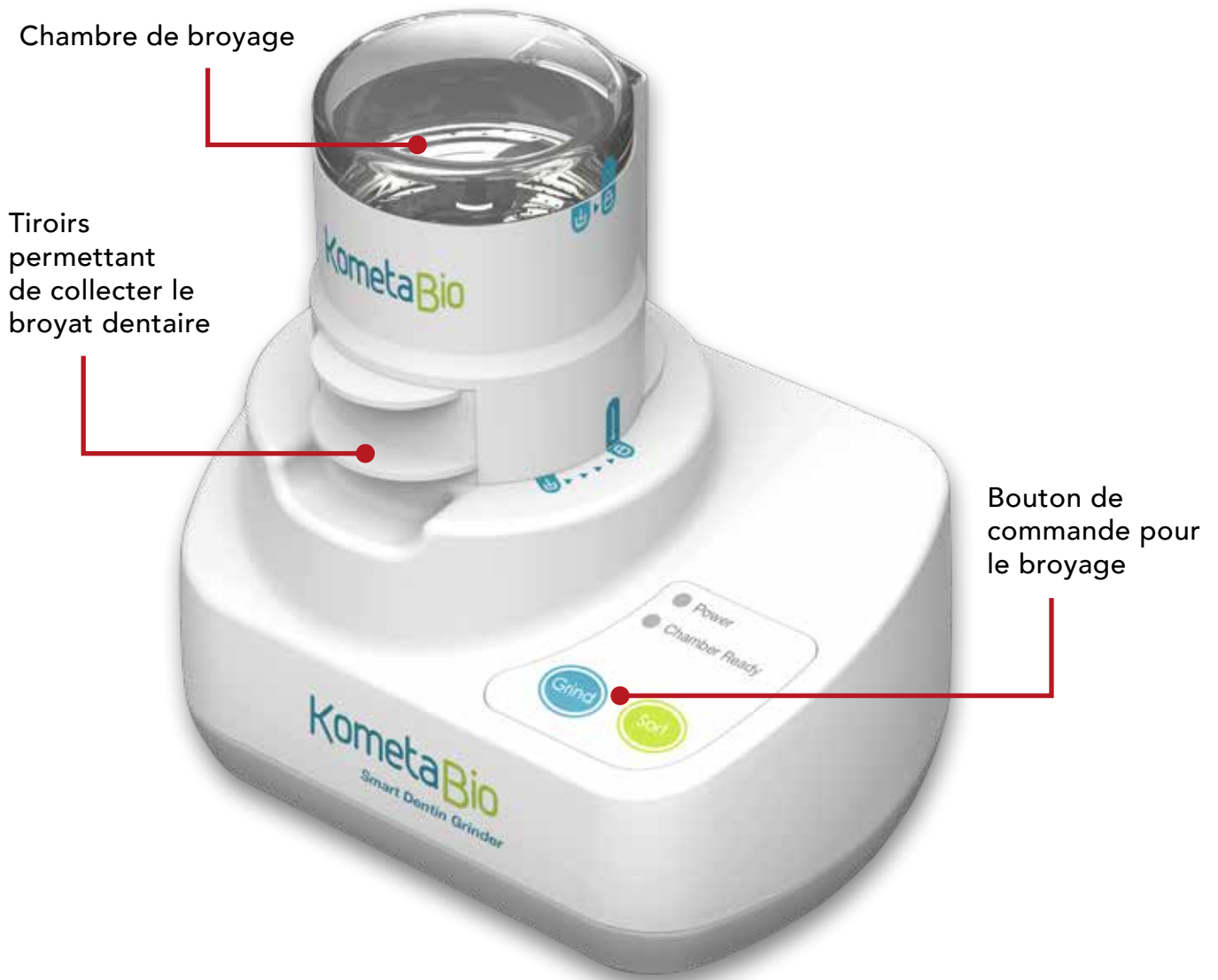



### Smart Grinder GENESIS Complete Kit (kit complet)

1 x Smart Grinder GENESIS

Dispositif de base

6 x Chambres de broyage (usage unique, individuel pour chaque patient)

6 x Récipients pour particules

6 x Cleanser (nettoyant) 5 ml

6 x PBS (solution saline tamponnée au phosphate) 5 ml

**RÉF 4300G**

### Smart Grinder GENESIS

1 x Smart Grinder GENESIS

Dispositif de base

**RÉF 4301G**



### Chamber Kit

6 x Chambres de broyage (usage unique, individuel pour chaque patient)

6 x Récipients pour particules

6 x Cleanser (nettoyant) 5 ml

6 x PBS (solution saline tamponnée au phosphate) 5 ml

**RÉF 4302**





### **Cleanser Kit**

6 x Cleanser (nettoyant) 5 ml

6 x PBS (solution saline tamponnée au phosphate)  
5 ml

**RÉF 43041**



### **Dentin Graft Accelerator**

6 x EDTA 5 ml

**RÉF 4304**



# Instructions

Retrouvez des films sur le Champions Smart Grinder sur le lien ou en scannant le QR-Code sur votre portable.



## **Smart Grinder**

Greffe osseuse autologue réalisée à partir des dents extraites du patient

<https://vimeo.com/336975548>



## **Préservation du volume après l'extraction dentaire**

Préservation du volume des tissus mous et durs grâce à la greffe osseuse réalisée à l'aide du Smart Grinder.

<https://vimeo.com/311848197>



## **Procédé Smart Grinder**

Étapes du procédé

<https://vimeo.com/173354091>






### **Extraction dentaire et préparation du greffon à l'aide du Smart Grinder**

Extraction et mise en place du greffon en site 14 à l'aide du Smart Grinder. Mise en place de la prothèse provisoire en sites 17 à 13.

<https://vimeo.com/481630710>

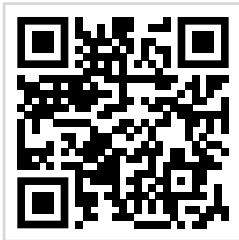

### **Concept du procédé Smart Grinder**

Animation avec Smart Grinder

<https://vimeo.com/575295760>

# Notes



Welcome  
to the  
future



**Champions-Implants GmbH**

Im Baumfeld 30 | Champions Platz 1 | D-55237 Flonheim  
tel +49 (0)6734 91 40 80 | fax +49 (0)6734 10 53  
info@champions-implants.com  
champions-implants.com